

Einstufiger Test für SARS-CoV-2-Antigen

(kolloidales Gold)

Zum Selbsttest


Ein schnelle, bequeme, einfache und zuverlässige Methode zum Nachweis von COVID-19



Verwendungszweck

Einstufiger Test für SARS-CoV-2-Antigen (Kolloidales Gold) ist zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen in menschlichen Nasentupferproben vorgesehen.

Dieser Test eignet sich für medizinische Laien als Selbsttest zu Hause oder bei der Arbeit.

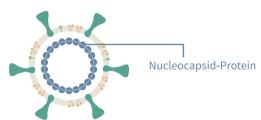

Produktkomponenten



SARS-CoV-2-Antigen -Testkarte










Einweg-Probentupfer



Benutzerhandbuch

COVID-19-Diagnosetests

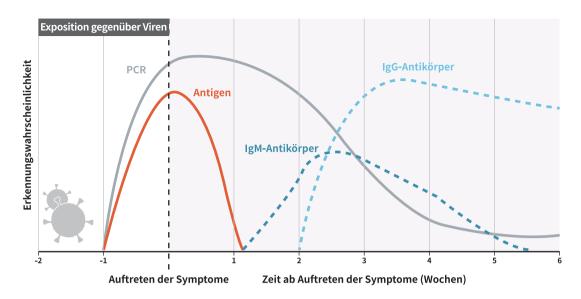

- PCR-basierte Tests können kleine Mengen an viralem genetischem Material nachweisen.
- Antigen-Tests können das Vorhandensein von viralen Proteinen nachweisen und positive Ergebnisse liefern, wenn eine Person am infektiösesten ist.
- **Antikörpertests** können die körpereigene Immunantwort auf das Virus nachweisen.

Eigenschaften



Nicht-invasive Probenahme (Probentyp: Nasentupfer)



Testergebnisse visuell lesen. Benötigen Sie keine Testausrüstung.



Früherkennung einer SARS-CoV-2-Infektion



Schnelltest. Testergebnis in 10-15 min verfügbar.




Einfache Bedienung, leicht zu erlernen und zu bedienen



Lagerung bei Raumtemperatur (4-30 ° C)

Betrieb

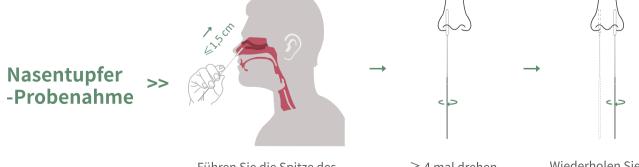


Führen Sie die Spitze des Tupfers in ein Nasenloch ein.

≥ 4 mal drehen (insgesamt 15 s)

Wiederholen Sie mit dem gleichen Tupfer.

Probenvorbehandlung >>

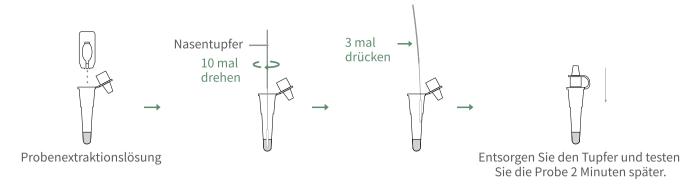


Probe hinzufügen:
2-3 Tropfen

→ Ergebnis in 10-15 min ablesen

Schritt 1

Schritt 2

Testergebnisse

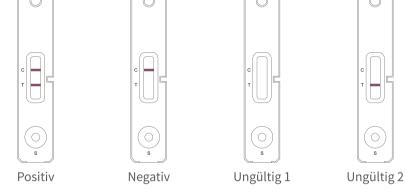





Getein Biotech, Inc.

Add: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China

Tel: +86-25-68568508/68568594

Fax: +86-25-68568500

E-mail: sales@getein.com.cn; overseas@getein.com.cn

Web: en.bio-gp.com.cn



CMC Medical Devices & Drugs S.L.

Add: C/ Horacio Lengo Nº 18, CP 29006, Málaga, Spain









